

GenTeal™

Benetzungslösung für die Augen



Diese Gebrauchsinformation enthält wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig und bewahren diese zur späteren Verwendung auf.

- Befeuchtung der Augenoberfläche
- Benetzungsmittel für alle Arten von Kontaktlinsen

Beschreibung:

GenTeal™ ist eine wässrige Lösung. Sie enthält 0,3 % Hypromellose, Natriumchlorid, Borsäure, Dequest 20605, Kaliumchlorid und GenAqua™ (Natriumperborat).

STERILE  Hergestellt unter aseptischen Bedingungen

Anwendungsvorschriften:

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Tropfen Sie 1–2 Tropfen in jedes Auge (vermeiden Sie das Auge mit der Tropferspitze zu berühren) und blinzeln Sie mehrere Male oder
- bringen Sie vor dem Einsetzen einige Tropfen auf jede Linse.

Gegenanzeigen:

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
- Vor der Anwendung Versiegelungsring entfernen.
- Berühren Sie nie mit der Tropferspitze der Flasche eine Oberfläche oder das Auge, da dies die Lösung verunreinigen könnte.
- Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch und bewahren diese unter 25 °C auf.
- Bevor Sie die Augentropfen wechseln oder andere Augenarzneimittel während des Tragens von Kontaktlinsen verwenden, fragen Sie bitte Ihren Augenarzt oder Apotheker.
- Geöffnete Flasche innerhalb von 1 Monat aufbrauchen.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

Warnhinweise:

- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Bei Augenschmerzen, Veränderungen des Sehvermögens sowie bei anhaltenden Rötungen oder Irritationen sollten Sie das Produkt absetzen und Ihren Augenarzt aufsuchen.

Nebenwirkungen:

GenTeal™ wird normalerweise sehr gut vertragen. Nach dem Eintropfen kann es zu vorübergehendem Verschwommensehen kommen. In einigen Fällen wurde über Brennen, Stechen, allergische Reaktionen oder Augenrötungen nach dem Eintropfen berichtet.

Wenn Sie eine dieser Reaktionen bei sich beobachten, unterbrechen Sie die Anwendung und suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

Packungs- **inhalt:**

1 x 10 ml
3 x 10 ml
Vorteilspackung

Bonuspunkte **für den Treue-Pass**

1
3



0459

Hersteller:

EXCELVISION
F-07100 Annonay
Frankreich

Vertrieb durch:

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653

Stand der Information:

Oktober 2005



THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT

TREUE-PASS

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Ihre Augen langfristig mit **GenTeal™** zu schützen.

Nach Einsendung dieser Treuekarte erhalten Sie von Novartis Ophthalmics einmalig eine praktische Tropfhilfe, die Ihnen das Eintropfen von **GenTeal™** noch leichter macht.

Zusätzlich belohnt Novartis Ophthalmics Ihre Treue. Sammeln Sie die auf der Packungslasche aufgedruckten Treuepunkte. Sie erhalten dann für je **6 Treuepunkte** eine Packung **GenTeal™** gratis.

So einfach kommen Sie an die Tropfhilfe und GenTeal™:

Zum Erhalten der Tropfhilfe schicken Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an:

Novartis Pharma GmbH/BU Ophthalmics
Roonstr. 25
90429 Nürnberg

Danach senden Sie jeweils 6 Treuepunkte (abgetrennte Packungslaschen) an dieselbe Adresse, um Ihre Gratispackung **GenTeal™** zu erhalten.

Bitte Absender und Unterschrift nicht vergessen!

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten gespeichert und bearbeitet werden, so dass Sie am Bonuspunkte-System teilnehmen können und auch zukünftig Informationen hierzu von Novartis Pharma erhalten. Novartis Pharma versichert Ihnen hiermit, dass Ihre Daten nicht an Dritte zu werblichen Zwecken weitergeleitet werden.

Unterschrift

 **NOVARTIS**
OPHTHALMICS

