

Artelac® Splash MDO®

Hyaluronsäure 0,24%

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

danke, dass Sie sich für Artelac® Splash MDO® entschieden haben! Dies ist ein ideales Produkt für die sofortige Linderung und Befeuchtung trockener Augen aufgrund von externen Umwelteinflüssen. Es erfrischt und befeuchtet Ihre trockenen Augen auf natürliche Weise und lindert die Symptome von trockenen, müden, gestressten und gereizten Augen.

- Artelac® Splash MDO® ist eine kristallklare Augentropfenlösung.
- Artelac® Splash MDO® ist frei von Konservierungsstoffen.
- Artelac® Splash MDO® kann nach dem ersten Öffnen 12 Wochen verwendet werden.
- Artelac® Splash MDO® enthält Hyaluronsäure, die als natürliches Polymer auch im gesunden menschlichen Auge und im natürlichen Tränenfilm vorkommt.
- Artelac® Splash MDO® eignet sich zum Befeuchten von weichen und harten Kontaktlinsen während des Tragens und verbessert damit merklich den Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen.
- Artelac® Splash MDO® ist einfach anzuwenden, gut verträglich und sicher.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Bausch + Lomb wünscht Ihnen und Ihren Augen gute Besserung!

Zusammensetzung:

Artelac® Splash MDO® enthält 0,24 % Hyaluronsäure und andere Bestandteile wie steriles Wasser, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat-Dodecahydrat und Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat. Es ist frei von Konservierungsstoffen.

Darreichungsform:

Artelac® Splash MDO® ist in Packungen zu 10 ml und 2 x 15 ml Augentropfen erhältlich.

Verwendungszweck von Artelac® Splash MDO®:

Artelac® Splash MDO® eignet sich besonders, um trockene, müde, gestresste und gereizte, aber auch tränende Augen, die aufgrund externer Umweltfaktoren, wie z. B. übermäßiges Arbeiten am Computer, Klimaanlage, seltenes Blinzeln und Wind, beeinträchtigt wurden, zu erfrischen und zu befeuchten. Ebenso können bestimmte Medikamente (wie die Antibabypille, Antihistaminika, Betablocker, Antispasmodika, Diuretika), medizinische Eingriffe (wie LASIK-Operationen oder refraktive Operationen) sowie bestimmte Krankheiten und Konservierungsstoffe in einigen Augentropfen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Trockenen Augen spielen. Angesichts der Eigenschaften dieses Produkts können auch Anwender mit chronisch trockenen Augen davon profitieren.

Wie oft ist Artelac® Splash MDO® anzuwenden?

Geben Sie bei Bedarf einen Tropfen Artelac® Splash ins Auge. Da Artelac® Splash MDO® frei von Konservierungsstoffen ist, können Sie es täglich beliebig häufig anwenden.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Artelac® Splash MDO®

In seltenen Fällen kann dieses Produkt Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. lokale allergische Reaktionen, verursachen. In diesen Fällen sollte die Behandlung beendet werden. Bitte verwenden Sie Artelac® Splash MDO® nicht mehr nach Ablauf des Mindestverwendbarkeitsdatums. Nicht verwenden, wenn die Flasche (MDO®) beschädigt ist.

Zusätzliche Informationen zu Artelac® Splash MDO®

Welche Aufgabe hat der Tränenfilm?

Der Tränenfilm erfüllt für das Auge wichtige Aufgaben. Er versorgt die Augenoberfläche mit den wesentlichen Nährstoffen, bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen dem Augenlid und der Hornhaut und sorgt für eine gesunde Augenfunktion sowie für klares Sehvermögen. Gleichzeitig verhindert er eine Austrocknung des Auges, unterstützt die Heilung oberflächlicher Verletzungen der Hornhaut und schützt diese vor weiteren Schädigungen. Der Tränenfilm besteht aus drei Schichten. Die innerste Schicht – die Mucinschicht – sorgt dafür, dass Feuchtigkeit und Tränenflüssigkeit auf dem Auge gebunden werden. Die mittlere Schicht ist eine wässrige Lösung aus Nährstoffen und Ionen, die das Auge befeuchtet und vor Infektionen schützt. Die äußere Schicht – die Lipidschicht – ist eine dichte, fetthaltige Schicht, welche die Feuchtigkeit auf dem Auge einschließt und die Verdunstung des Tränenfilms vermindert. Alle drei Schichten befinden sich in einem empfindlichen Gleichgewicht, das eine gesunde Augenoberfläche sicherstellt. Wird das Gleichgewicht des Tränenfilms durch externe Faktoren beeinträchtigt, können Symptome wie das Gefühl von Trockenheit, Brennen oder eines Fremdkörpers im Auge, gereizte, gerötete, müde oder verklebte Augen am Morgen und gelegentlich übermäßiger Tränenfluss auftreten.

Warum ist Hyaluronsäure positiv für Ihre Augen?

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil gesunder Augen und des Tränenfilms. Diese natürliche, Feuchtigkeit spendende Substanz hat eine hohe Bindungsaffinität mit Wasser und unterstützt die dickste Schicht des Tränenfilms, die wässrige Schicht, bei der schnellen Befeuchtung und der Wiederherstellung Ihres Wohlbefindens.

Wie kann Artelac® Splash MDO® Ihren Augen helfen?

Artelac® Splash MDO® mit Hyaluronsäure erfrischt sofort Ihre Augen und stabilisiert den Tränenfilm für eine gesunde Augenoberfläche, indem es diesen natürlichen Feuchtigkeitsspender wieder auffüllt.

Was können Sie sonst noch für Ihre trockenen Augen tun?

- Legen Sie bei Bildschirmarbeit öfter eine kurze Pause ein
- Achten Sie bewusst darauf, regelmäßig zu blinzeln
- Lüften Sie regelmäßig oder verwenden Sie einen Luftbefeuchter
- Trinken Sie genügend Wasser
- Schützen Sie Ihre Augen vor Wind, wenn Sie sich im Freien aufhalten
- Passen Sie evtl. Ihre Ernährung an, um mehr Omega-3-Fettsäuren und B-Vitamine aufzunehmen


Artelac® Splash MDO® ist auch in praktischen Ein-Dosis-Ophtioten (EDO®) erhältlich.

Artelac® Splash MDO®, Dezember 2011


3312101 81401PB931/2

Wie ist Artelac® Splash MDO® anzuwenden?


Durch den patentierten Pumpmechanismus von Artelac® Splash MDO® benötigt die Augentropfenlösung keine Konservierungsstoffe. Die ergonomische Daumenstütze sorgt außerdem für eine einfachere und sicherere Handhabung.

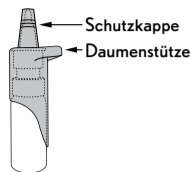


- Entfernen Sie die Schutzkappe vor jeder Anwendung.

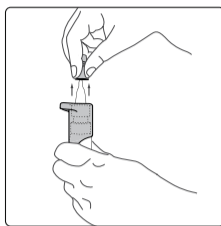


- Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenstütze und halten Sie die Flasche unten mit mehreren Fingern fest, wie auf der Abbildung gezeigt.

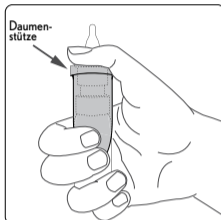

- Drehen Sie die Flasche um und halten Sie sie so wie auf der Abbildung gezeigt. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal verwenden, sind erst einige Druckbewegungen notwendig, bevor der erste Tropfen erscheint.

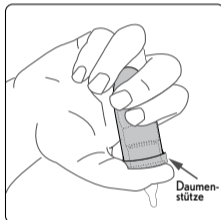

- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger nach unten, halten Sie das Fläschchen in senkrechter Position und drücken Sie vorsichtig auf die Daumenstütze, um einen Tropfen in Ihr Auge einzubringen.

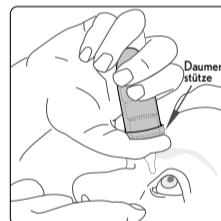

Schließen Sie dann Ihr Auge und bewegen Sie es langsam hin und her, damit sich der Tropfen optimal auf der Augenoberfläche verteilen kann.

- Um eine Verunreinigung der Augentropfenlösung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Flaschenspitze weder mit Ihren Fingern noch mit dem Auge in Berührung kommt.
- Setzen Sie die Schutzkappe nach jeder Anwendung wieder auf die Flaschenspitze.



Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin

Vertrieb:
Bausch & Lomb GmbH
D-13581 Berlin

Kundenservice:
„Abteilung Artelac“
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Tel.: +49(30) 33093 - 5050
Fax: +49(30) 33093 - 399
E-Mail: auge@bausch.com
www.bausch-lomb.de
www.artelac.de



Sterilisationsmethode, aseptisch



Das Medizinprodukt ist in einem Temperaturbereich von +1°C bis +25°C zu lagern



Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.



Das Medizinprodukt kann nach dem ersten Öffnen 12 Wochen verwendet werden.



Mindestverwendbarkeitsdatum



Chargennummer



Gebrauchsanleitung beachten!