

---

## Zonulin Test

### Durchlässigkeit des Darms

An dem Protein Zonulin lässt sich messen, wie durchlässig Ihre Darmbarriere ist. Diese Barriere soll Nährstoffe in die Blutbahn lassen, während Schad- und Giftstoffe ausgeschieden werden. Eine zu durchlässige Darmbarriere wird auch als Leaky Gut bezeichnet. Mit dem cerascreen® Zonulin Test erhalten Sie einen Einblick in die Funktion und Gesundheit Ihrer Darmbarriere.

- Bestimmung des wichtigsten Parameters zur Darmdurchlässigkeit
- Zu Hause Stuhlprobe entnehmen – einfach & diskret
- Professionelle Analyse im medizinischen Labor
- Persönliche Empfehlungen, um Ihre Darmbarriere zu stärken



Rund um die Uhr



einfach & schmerzfrei zu Hause durchführen



Keine An- und Abreise zum Arzt



umfangreicher Ergebnisbericht



Telefon-Hotline mit Experten



Ergebnisse innerhalb weniger Tage

### Warum Zonulin testen?

In den letzten Jahren hat sich die Wissenschaft immer intensiver mit dem menschlichen Darm befasst. Immer neue spannende Zusammenhänge zwischen Darmflora, Verdauung und Gesundheit treten dabei zutage. Die Darmbarriere gehört zu den eher neuen Forschungsgebieten und wird in der Wissenschaft derzeit viel diskutiert. Ist die Darmbarriere zu durchlässig geworden und ein möglicher Leaky Gut liegt vor, könnte das Beschwerden verursachen oder aber ein Anzeichen für eine Erkrankung sein, wie Zöliakie oder eine chronische Darmentzündung.

Mit dem Messwert der Zonulin-Konzentration erhalten Sie einen Überblick über den Zustand der Darmbarriere und deren Durchlässigkeit. Die Ergebnisse des Zonulin Tests können ein erster Schritt sein, die Gesundheit Ihrer Darmbarriere und Ihrer Darmflora gezielt zu verbessern.

---

## Wie funktioniert der Test?

Für den Zonulin Test entnehmen Sie sich selbst ganz einfach, bequem und diskret zuhause eine kleine Stuhlprobe. Dazu nutzen Sie eine Stuhlauffanghilfe und den Entnahmelöffel im Probenröhrchen, die beide dem Testkit beiliegen. Anschließend schicken Sie die Probe im Probenröhrchen an ein medizinisches Fachlabor. Sie sollten eine bohnen große Menge Stuhl in das Probenröhrchen geben. Das sind 3 bis 4 kleine Löffel mit dem beigelegten Löffelchen am Deckel des Probenröhrchens. Fällt die Probe ein bisschen größer aus, ist das auch kein Problem.

Das Labor führt dann eine Analyse mit der sogenannten ELISA-Methode durch, mit der sich die Konzentration bestimmter Proteine, Antikörper und anderer Stoffe in medizinischen Proben nachweisen lässt. In diesem Fall wird analysiert, wie viel Zonulin sich pro Milligramm Stuhl in der Probe befindet.

**Achtung:** Sie sollten den Test nicht durchführen, wenn Sie unter Durchfall oder an einem akuten Magen-Darm-Infekt leiden.

## Die Vorteile des Zonulin Tests

Welche Stoffe aus dem Darm in den restlichen Körper gelangen, steuert Ihre Darmbarriere. Bei erhöhtem Zonulin-Wert steigt die Durchlässigkeit der Darmbarriere. Einige Experten vermuten, dass in einem solchen Leaky Gut die Ursache für Symptome wie Müdigkeit, Infektanfälligkeit und Hautprobleme liegen könnte.

Mit dem cerascreen® Zonulin Test erfahren Sie auf schnell und einfach den relevantesten Messwert für die Durchlässigkeit Ihrer Darmbarriere. Erhöhte Zonulin-Werte können außerdem erste Hinweise auf eine Zöliakie oder entzündliche Darmerkrankung sein.

Profitieren Sie von unserer Expertise: cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsendekits in Europa, mit 8 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 50 zugelassene Einsende-Testkits (Medizinprodukte) entwickelt, 250.000 Proben ausgewertet und beliefern 19 Länder.

## Alle Vorteile im Überblick:

- individuelle Auswertung
- von Experten entwickelt
- sicher und vertraulich
- Analyse im Fachlabor
- eigener, sicherer Kundenbereich
- persönliche Beratung