


Histamin-Intoleranz Test

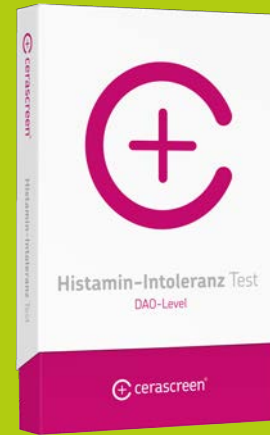

Diaminoxidase-Aktivität (DAO) bei Histaminproblemen

Brummschädel, Schniefnase, Hautausschlag. Haben auch Sie ständig Beschwerden, die sich wie eine Allergie anfühlen – aber bei Allergietests kommt nichts heraus? Schon einmal an eine Histamin-Intoleranz gedacht? Bei dieser Unverträglichkeit kann Ihr Darm Histamin aus der Nahrung nicht richtig verarbeiten und es kommt zu Entzündungen im ganzen Körper.

Mit dem cerascreen[®] Histamin-Intoleranz Test bestimmen Sie mit einer Blutprobe die Konzentration des Enzyms Diaminoxidase (DAO), das Histamin im Darm abbaut. Ein niedriger Wert kann einen Verdacht auf Histamin-Intoleranz bestärken. Sie erhalten einen Ergebnisbericht mit Informationen und Empfehlungen zu histaminarmer Ernährung und Darmgesundheit.

- + einfach und bequem zuhause Probe entnehmen
- + professionelle Analyse im medizinischen Labor
- + Zeit sparen: kein Arztbesuch, keine Wartezeit
- + leicht anwendbare Empfehlungen
- + Ergebnis innerhalb weniger Tage nach Probeneingang

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen[®] ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.

Histamin-Intoleranz Test



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Histamin-Intoleranz Test

Der Histamin-Intoleranz Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Histamin-Intoleranz Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht machen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Histamin-Intoleranz Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Histamin-Intoleranz Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Der Test ist außerdem nicht dazu geeignet, Krankheiten zu untersuchen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Histamin-Intoleranz Test:
<https://www.cerascreen.de/products/histamin-intoleranz-test>



PZN 02218275

Dieses Kit kann nur innerhalb Deutschlands
kostenlos zurückgesendet werden.

