



BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- Reißfestes Vlies
- Stabiler Spender mit Tragegriff
- Lösung 28 Tage verwendbar



Anwendungsgebiete

Das universell einsetzbare Vliestuchsystem für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Geeignet für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde oder weniger (gem. VAH), z. B.:

- Für Arbeitsflächen
- Für patienten- und bewohnernahe Flächen
- Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
- Überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Mehrwegtüchern nicht möglich ist

Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2 Liter Anwendungslösung (bzw. 1,2 Liter bei der 40er Rolle oder mindestens 600 ml bei der 30er Rolle) des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90, 40 oder 30 Einzeltüchern erhältlich. Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m²). Auch als BODE X-Wipes basic Vliesrolle verfügbar, die mit 40 g/m² eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).

Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der Tuchspender mit 2 Liter Desinfektionsmittellösung (90er Rolle), 1,2 Liter (40er Rolle) oder 600 ml (30er Rolle in BODE X-Wipes Dose) befüllt.

Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

Standzeit

Bei ordnungsgemäßigem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

BODE X-Wipes

Zwei Möglichkeiten der Befüllung

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle mit Folienbeutel in sauberen, trockenen Spender einsetzen.



Desinfektionslösung in den Folienbeutel geben, Vliestuchrolle gleichmäßig benetzen.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Schrauben Sie den Deckel am Spender wieder zu. Etikett beschriften.



Folie zusammen mit Deckel entsorgen.

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle einsetzen.




Lösung von innen nach außen zugeben.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen und Spender sorgfältig verschließen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Etikett beschriften.

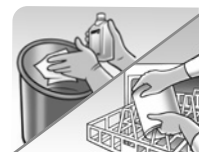

Spender vor der Wiederauffüllung manuell oder maschinell desinfizieren.

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN
BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle			
1 Spender Deckelverschluss blau		981 370	10273940
1 Spender Deckelverschluss grün		981 372	10273963
1 Spender Deckelverschluss rot		981 371	10273957
BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem			
90 Tücher Größe 200 x 300 mm		981 946	19175914
BODE X-Wipes Vliesrolle			
90 Tücher Größe 200 x 300 mm		980 556	3538510
40 Tücher Größe 200 x 300 mm		980 557	3538473
30 Tücher Größe 200 x 300 mm		981 920	3539248
BODE X-Wipes basic			
90 Tücher Größe 200 x 300 mm		980 524	3538527
BODE X-Wipes Dose für 30er Rolle			
1 Stück		980 610	3539337
BODE X-Wipes Wandhalter			
1 Stück		980 583	3539219
BODE X-Wipes Sicherungsbügel			
1 Stück		980 584	3539225

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info