

nasic®

Salin Duo

Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen!

Medizinprodukt

Anwendungsgebiet:

Unterstützende Behandlung von Schnupfen, Heuschnupfen, entzündeter Nasenschleimhaut und verstopfter Nase. Zum Abschwellen der Nasenschleimhaut. Mit Dexpanthenol zur Pflege und Befeuchtung der Nasenschleimhaut.

Zusammensetzung:

Hypertone Salzlösung (entsprechend 2,5 % Kochsalzlösung), Dexpanthenol (0,5 %), Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Kaliumsorbat (als Konservierungsmittel), Hypromellose

Darreichung und Inhalt:

15 ml hypertone Salzlösung zum Sprühen in die Nase

Anwendung:

- Nehmen Sie die Schutzkappe ab und drücken Sie den Flügel-Sprühkopf herunter. Bitte beachten Sie, dass vor dem Erstgebrauch einige Pumpstöße benötigt werden.
- Die Sprayflasche sollte während der Anwendung aufrecht gehalten werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Nach der Anwendung sollte die Schutzkappe wieder aufgesetzt werden.
- Um eine Übertragung von Keimen zu vermeiden, sollte nasic® Salin Duo nur von einer Person verwendet werden.

Dosierung:

- Erwachsene und Jugendliche mehrmals täglich bei Bedarf 1 – 2 Sprühstöße
- Kinder ab 6 Jahren 1 Sprühstoß mehrmals täglich, je nach Bedarf.

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Symptome länger als 1 Woche anhalten.

Nach Anbruch ist nasic® Salin Duo 6 Monate lang haltbar.

Kontraindikationen:

- Verwenden Sie nasic® Salin Duo nicht
- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe
 - nach Operationen, bei Verletzungen oder starken Entzündungen im Nasen- und Rachenraum

Schwangerschaft und Stillzeit:

Aufgrund fehlender Studiendaten sollten schwangere und stillende Frauen vor der Anwendung von nasic® Salin Duo ihren Arzt konsultieren.

Wechselwirkungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Produkten bekannt. Trotzdem sollte nasic® Salin Duo nicht gleichzeitig zusammen mit anderen im Nasen- und Rachenraum anzuwendenden Arzneimitteln oder Produkten angewendet werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Anwendungen.

Hinweis:

- Kaliumsorbat kann lokale Reizungen der Nasenschleimhaut verursachen.
- Die erhöhte Salzkonzentration (hypertone Lösung) kann zunächst ein brennendes Gefühl in der Nase verursachen, das jedoch harmlos ist.

Aufbewahrungshinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Flasche aufrecht stehend lagern.
- Nicht über 25 °C lagern

Das Verfallsdatum ist auf dem Behälter und der äußeren Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum!

Stand der Gebrauchsanweisung:

September 2024

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist gemeldet werden:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Abteilung Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn
Germany

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Cassella-med:

Tel.: 0800/1652-200
Fax: 0800/1652-700
E-Mail: dialog@cassella-med.eu



Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck
Germany

Vertrieb

Cassella-med
Gereonsmühlengasse 1
50670 Köln
Germany

Ein Unternehmen der



Chargen-
bezeichnung



Verwendbar
bis



Hersteller