

Allgemeines

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Silikon gegen schädlichen Lärm, vor Gebrauch zu formen (EN 352-2:2002, EU 2016/425).

Prüfstelle für Konformitätsbewertung und Fertigungskontrolle: IFA Institut für Arbeitsschutz (0121), Alte Heerstraße 111, 53757 St. Augustin, Deutschland.

Material: Silikon

Farbe: blau

Größe: entfällt

Eigenschaften: Beliebig formbares, reines Silikon. Die hautfreundlichen Stöpsel passen sich, ohne zu drücken, jedem Ohr an.

Anwendung: VOR-Ohr Stöpsel (wird vor der Öffnung des Gehörgangs platziert)



Den Ohrstöpsel durch kräftiges Kneten erweichen und zur Kugel formen (keine längliche Form!). **Stöpsel nicht verkleinern!**



Die Kugel vor die Öffnung des Gehörgangs platzieren und diese durch sanftes Andrücken dicht verschließen. **Nicht in den Gehörgang einführen!**



Entfernung: Den Stöpsel in einem Stück mit den Fingern langsam herausnehmen. Keine Hilfsmittel verwenden!


Der Stöpsel kann zuvor durch leichten Druck von hinten auf die Ohrmuschel gelockert werden. Bei langen Fingernägeln darauf achten, dass der Stöpsel nicht beschädigt wird.

Schalldämmung (EN ISO 4869-2)

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert (dB)	23,5	21,4	19,1	20,3	23,6	30,7	36,4	35,0
Standardabweichung (dB)	4,7	3,5	2,8	4,3	4,5	4,7	3,1	6,2
Angenommener Schutz APV (dB)	18,8	17,9	16,3	16,0	19,1	26,0	33,3	28,8

SNR* = 23 dB H* = 26 dB M* = 19 dB L* = 18 dB

*Wert

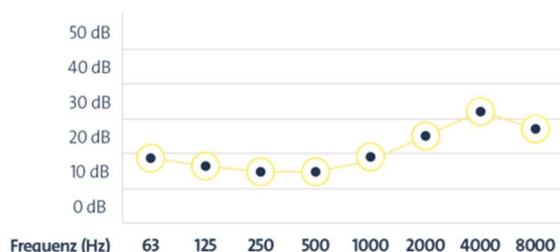

Hinweise

- Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nach Anleitung ein und kontrollieren Sie den korrekten Sitz.
- Achten Sie auf eine hygienische Anwendung. Ihre Hände, Ohren und Ohrstöpsel müssen sauber und trocken sein!
- Die Gehörschutzstöpsel müssen regelmäßig auf Verwendbarkeit und die Notwendigkeit der Reinigung untersucht werden.

- Ersetzen Sie verschmutzte, beschädigte oder unzureichend abdichtende Ohrstöpsel.
- Reinigung: Leichte Verunreinigung können mit einem Tuch und warmem Wasser vorsichtig abgewischt werden. Danach an der Luft vollständig trocknen lassen.
- Gehörschutz muss in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden.
- Plötzliches oder schnelles Entfernen des Stöpsels aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.
- **Als Wasserschutz:** Nicht zum Tauchen bei mehr als 1 m Wassertiefe verwenden.
Bei stärkeren Bewegungen beim Schwimmen sowie beim Springen ins Wasser kann sich der Ohrenschutz lockern und verloren gehen. Bei Entzündungen des Ohres, Verletzungen des Trommelfells und beim Einsatz von Paukenröhrchen fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.
- Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen (z. B. Handcreme) leiden. Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden.
- Achten Sie darauf, dass der Stöpsel groß genug ist, sodass er nicht versehentlich in den Gehörgang gelangen kann. Sollte eine Entfernung mit den Fingern nicht mehr möglich sein, wenden Sie sich bitte an einen Arzt (vorzugsweise HNO-Arzt).
- Warnung: Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes erheblich beeinträchtigen!
- Von Kleinkindern fernhalten (Gefahr des Verschluckens).
- Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren möglich; nur unter Anleitung von Erwachsenen.
- Aufbewahrung: In der Dose, trocken und unter 30° C.

Einsatzgebiete

OHROPAX® Silicon AQUA ist besonders zum Schutz vor Eindringen von Wasser beim Schwimmen und Baden geeignet. Aufgrund seines dichten Abschlusses und des hohen Tragekomforts ist OHROPAX® Silicon AQUA aber auch bestens zum Schutz vor Lärm und Geräuschen geeignet wie z.B. beim Schlafen und Entspannen.

OHROPAX® Silicon AQUA ist an vielen Arbeitsplätzen geeignet, insbesondere in den sogenannten nicht klassischen Lärmbereichen wie Großraumbüros und Rechenzentren (Lärmpegel <75 dB (A)). Materialbedingt ist OHROPAX® Silicon AQUA nicht geeignet an schmutz- und staubbelasteten Arbeitsplätzen.

Eignung

Vor der Anwendung bei starkem Lärm sollten Sie zunächst überprüfen, ob der Stöpsel für diese Belastung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die Hinweise, Schalldämmwerte und die [Informationen zu Schalldämmwerten und Schutzwirkung](#) (vgl. Dokument).

Verträglichkeit

OHROPAX® Silicon AQUA gilt als ausgesprochen gut verträglich. Bestandteile mit bekanntem allergieauslösendem Potenzial sind nicht enthalten. An Gehörschutz muss man sich manchmal erst gewöhnen. Wir empfehlen, die Tragedauer allmählich zu erhöhen. In seltenen Fällen wird anfangs der eigene Pulsschlag wahrgenommen. Dieser Effekt verschwindet normalerweise nach kurzer Gewöhnung.