

Hyalfid GEL

Augentropfen mit Natriumhyaluronat 0,30 %
und Aminosäuren.
Ohne Konservierungsstoffe

Zusammensetzung

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| Natriumsalz der Hyaluronsäure | 0,30 | g |
| L-Prolin | 0,0752 | g |
| Glycin | 0,100 | g |
| L-Lysinhydrochlorid | 0,014 | g |
| L-Leucin | 0,0108 | g |

Isotone Lösung, gepuffert auf einen pH-Wert von 7,2 q.s. ad 100 ml

Beschreibung

HYALFID GEL insd sterile, isotonische Augentropfen ohne Konservierungsstoffe, die das Natriumsalz der Hyaluronsäure enthalten, das für die Unterstützung einer unzureichenden Tränenbildung und Wiederherstellung der physiologischen Bedingungen des Tränenfilms bestimmt ist.

Hyaluronsäure ist ein Mukopolysaccharid, das Bestandteil zahlreicher Körpergewebe ist. Sie haftet an der Augenoberfläche und schützt, befeuchtet und benetzt sie. Aufgrund ihrer mukoadhäsiven Eigenschaften verbleibt sie lange auf der Augenoberfläche und stabilisiert den Tränenfilm.

Die im Produkt enthaltenen Aminosäuren L-Prolin, Glycin, L-Lysinhydrochlorid und L-Leucin verbessern die Benetzung der Augenoberfläche und können dazu beitragen, den Schutz des Epithels zu verbessern, das verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist.

Anwendungsgebiete

Durchsichtige, sterile und viskoelastische Tränenersatzflüssigkeit zum Schutz der Hornhaut.

Sie schützt, befeuchtet und benetzt das Auge und sorgt auf diese Weise für eine länger anhaltende Linderung von Beschwerden durch

- **mechanische Belastungen:** z. B. während und nach Gebrauch von Kontaktlinsen oder bei der operativen oder augenärztlichen Diagnostik;
- **mangelnde Benetzung der Hornhaut**

Art der Anwendung

Zwei bis dreimal täglich oder bei Bedarf öfter 1 - 2 Tropfen in den Bindehautsack tropfen.

Bei Verwendung von Kontaktlinsen kann das Produkt vor dem Einlegen der Linsen auf die innere Oberfläche der Kontaktlinsen getropft werden.

Gegenanzeigen

Bekannte Überempfindlichkeit gegen die Produktbestandteile oder andere, chemisch ähnliche Substanzen.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Bei gleichzeitiger lokaler Verabreichung von Arzneimitteln am Auge wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt
- Die Flasche nach Gebrauch gut verschließen
- Bei Beschädigung der Flasche das Produkt nicht verwenden
- Nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden
- Dieses Arzneimittel ist nur für die äußere Anwendung am Auge bestimmt
- Um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden, sollte ein Kontakt der Tropfvorrichtung mit dem Auge oder Gegenständen vermieden werden
- Nicht über 25 °C lagern
- Das Präparat außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Nebenwirkungen

Es wurden nach der Verabreichung des Produkts keine Nebenwirkungen berichtet.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen das Produkt keinesfalls weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen.

Nach Anwendung des Produkts kann es vorübergehend zu leicht verschwommenem Sehen kommen.

Ausgabedatum der neuesten Version der Gebrauchsanweisung: Rev.01 vom 12.07.2016

STERIL A 10 ml



CE 0373 SOOFT italia S.p.A.
C.da Molino 17
63833 Montegiorgio (FM) Italien
Tel. +39 0734 964096
www.sooft.it

HYFDGdeF000918