



FUTURO™ HANDGELENK-SCHIENE

10770

 MITTLERER
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

*Ärzte empfehlen oft die Anwendung einer festen Handgelenkbandage während der Behandlung des Karpaltunnelsyndroms und anderer schmerzhafter Handgelenkbeschwerden.

Zusammensetzung: Aluminium, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

**Stabilisierung und Unterstützung
bei schmerzenden, schwachen oder
verletzten Handgelenken.**

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Unterstützung bei häufigen Verletzungen wie
Verstauchungen, Zerrungen und Symptome
des Karpaltunnelsyndroms*

EIGENSCHAFTEN:

- ① Tief geschnittenes, ergonomisches Design
für freie Fingerbeweglichkeit.
- ② Stütze der Handfläche bietet mittlere
Stabilität.
- ③ Schlauchform mit drei Verschlüssen für
passgenauen Sitz.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
10770	15783261	14-21.5

Handgelenkumfang an der schmalsten Stelle messen.



TRAGEANWEISUNG:




Öffnen Sie die Verschlüsse. Stecken Sie die
Hand in die Bandage und positionieren Sie
die Metallschiene entlang der Handfläche.



Schließen Sie das mittlere Band und dann die
Bänder daneben.

Zur Verwendung an der linken Hand: Ziehen
Sie die Schiene aus dem Fach. Halten Sie die
Schiene gerade, drehen Sie die Bandage um
180 Grad und stecken Sie die Schiene in das
Fach auf der anderen Seite. Stecken Sie das
Ende der Schiene ein.

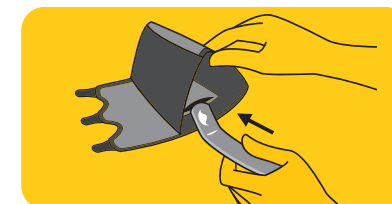

Stellen Sie alle Bänder so ein, dass Sie ein festes,
aber bequemes Tragegefühl haben.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
www.futuro.de

