



# Gegen bakterielle Vaginose

## Medizinprodukt

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

SOS Gegen bakterielle Vaginose behandelt wirksam akute bakterielle Scheideninfektionen und beugt Neuinfektionen vor. Die Wirkstoffe Milchsäure und Natriumlactat befeuchten, stärken und unterstützen die gesunde Vaginalflora. Der natürliche pH-Wert der Scheide wird wiederhergestellt und stabilisiert, wodurch die Produktion von übermäßigem Ausfluss und auffallendem Intimgeruch gestoppt wird. Durch bakterielle Vaginose bedingte Schmerzen wie Brennen, Juckreiz und Reizungen werden gelindert. SOS Gegen bakterielle Vaginose ist frei von Hormonen und Konservierungsmitteln und nur zur innerlichen Anwendung geeignet. Dazu einen Applikator vor dem Schlafen gehen einführen. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 6 Tage. Auch für Schwangere und während der Stillzeit geeignet. SOS Gegen bakterielle Vaginose ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Vorbeugung von bakteriellen Vaginosen (BV).

### Was ist eine bakterielle Vaginose (BV)?

Eine bakterielle Vaginose (BV) ist eine häufige Ursache von ungewöhnlichem vaginalem Ausfluss. Die BV ist keine sexuell übertragbare Infektion. Das häufigste Symptom einer bakteriellen Vaginose ist ungewöhnlicher vaginaler Ausfluss, der stark fischig riecht, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr. Möglicherweise beobachten Sie auch eine Veränderung der Farbe und Konsistenz Ihres Ausflusses, etwa dass er gräulich-weiß sowie dünnflüssig und wässrig wird. Eine bakterielle Vaginose ist in der Regel nicht mit Schmerzen oder Juckreiz verbunden. Wenn Sie eine gleichgeschlechtliche Partnerin haben, muss sie möglicherweise ebenfalls behandelt werden.

### Wiederkehrende bakterielle Vaginose:

Eine bakterielle Vaginose tritt häufig erneut auf, in der Regel innerhalb von 3–12 Monaten. Um die Symptome zu lindern und eine erneute bakterielle Vaginose zu verhindern, können folgende Maßnahmen helfen:

- Verwenden Sie Wasser und einfache Seife zum Waschen Ihres Genitalbereichs.
- Duschen Sie, statt zu baden.
- Verwenden Sie beim Baden keine parfümierten Seifen.
- Verwenden Sie keine Vaginaldeodorants, -spülungen oder -duschen.

### Anwendungsgebiet:

- Behandlung einer bakteriellen Vaginose.
- Verhinderung des erneuten Auftretens einer bakteriellen Vaginose.


### Anwendung:

1. Waschen Sie Ihre Hände
2. Nehmen Sie den Applikator aus der Folie.
3. Den Inhalt des Applikators schütteln und in Richtung Spitze drücken.



4. Entfernen Sie die Kappe durch leichte Drehbewegung an der Spitze des Applikators.

5. Führen Sie den dünnen Teil des Applikators in die Vagina ein. Das geht am besten, wenn

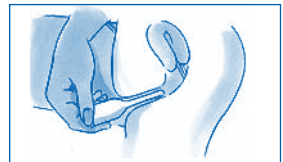

Sie eine liegende oder eine stehende Position mit einem angehobenen Bein einnehmen. Drücken Sie den kompletten Inhalt des Applikators aus dem dünnen Teil des Applikators aus. Sollte Gel verschüttet werden, ist das kein Grund zur Besorgnis, da eine ausreichende Menge Produkt pro Applikator enthalten ist.



6. Entfernen Sie dann wieder den Applikator und entsorgen Sie diesen im Plastikabfall, da dieser recycelt werden kann.
7. Waschen Sie sich Ihre Hände.

Der Anwendungsdauer umfasst 6 Tage, mit einem Applikator pro Tag. Sollten Sie einmal eine Applikation vergessen haben, verwenden Sie bitte keine doppelte Dosis, sondern machen Sie am nächsten Tag mit der Behandlung normal weiter. Wenn nach sechs Tagen Behandlungszeitraum keine Besserung eingetreten ist, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, um alternative oder zusätzliche Behandlungen zu besprechen. Das Gel wirkt nur lokal und kann daher während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegen einen dieser Inhaltsstoffe allergisch sind.

#### **Inhaltstoffe:**

Glycerol, Milchsäure, Propylenglycol, Natriumlactat, Hydroxyethylcellulose, Natriumhydroxid und Wasser.

#### **Aufbewahrung:**

Nicht mehr nach dem auf dem Tubenverschluss angegebenen Verfallsdatum verwenden. Trocken und bei Zimmertemperatur aufbewahren.

#### **Sicherheitshinweise:**

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Im Falle von allergischen Reaktionen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Außerhalb der Reichweite und außer Sichtweite von Kindern aufbewahren. Nur für vaginale Applikation. Zum Einmalgebrauch. Während einer Fertilitätsbehandlung kann sich dieses Produkt negativ auf die Befruchtung auswirken. Nicht zur Verwendung als Verhütungsmittel geeignet. Das Produkt ist mit Naturkautschuklatexkondomen kompatibel.

#### **Hinweise:**

Die beigelegten Pipetten enthalten eine klare Lösung. Das Gel enthält Milchsäure zur Wiederherstellung des normalen pH-Wertes und ist frei von Hormonen und Konservierungsstoffen.

#### **Inhalt:**

SOS Gegen bakterielle Vaginose enthält 6 Pipettenapplikatoren mit einer klaren gelartigen Flüssigkeit. Eine Packung enthält 6 (Einmal-) Applikatoren mit je 5 ml Lösung.



**Stand der Information:** Mai 2020



#### **Hersteller:**

Pharma Source B.V.  
Reduitlaan 33  
4814 DC Breda  
Niederlande

CE 2797

#### **Vertrieb:**

DISTRICON GmbH  
Am Joseph 15  
D-61273 Wehrheim

#### **Bedeutung der Symbole auf Packung und Tube:**



Hersteller



Nicht wiederverwenden



Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Gebrauchsinformation beachten



Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung

409\_REV01/G01  
500608v1