

VAXOL®

OHRENSPRAY

Vaxol® ist eine sichere und wirksame Methode zur Aufweichung und natürlichen Entfernung von Cerumen (Ohrenschmalz), reduziert die Notwendigkeit des Ausspülens oder erleichtert bei Bedarf das Ausspülen.

Vaxol® kann von Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr verwendet werden.


Das für Vaxol® verwendete Sprühsystem ist einfach in der Anwendung und gibt einen einzelnen, dosierten Sprühstoß in das Außenohr ab. Es ist einfach und bequem anzuwenden. Überdosierung, Verschütten und Verschmutzungen werden so verhindert.

Es wurde klinisch nachgewiesen, dass Olivenöl die Haut vor Austrocknung schützt und dadurch Juckreiz und Hautirritationen vermindert werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation vor der Anwendung.

Vor der Verwendung von VAXOL® Ohrenspray

- Vor dem ersten Gebrauch die Flasche kurze Zeit in der Hand erwärmen und gut schütteln.
- Bitte betätigen Sie anschließend 3-4 mal den Sprühkopf bis er sprüht (siehe Abbildung B), hierbei bitte die Sprühöffnung vom Körper weg halten.
- Nun ist das Produkt gebrauchsfertig.

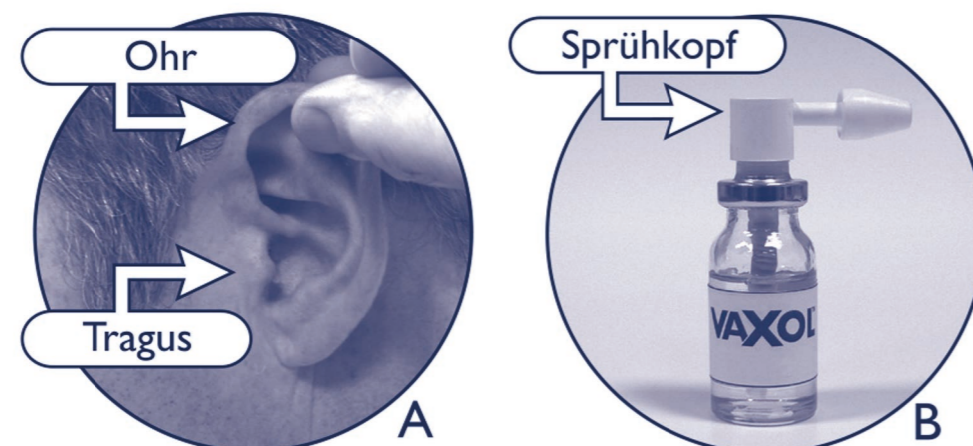

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

- Vaxol® ist am wirksamsten, wenn es vor Gebrauch in der Hand erwärmt und gut geschüttelt wird.
- Verwenden Sie Vaxol® wie von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen.
- Verwenden Sie Vaxol® ein- bis zweimal pro Woche, um einer Cerumenbildung vorzubeugen und den Selbstreinigungsprozess des Ohres zu unterstützen.
- Wenn eine medizinische Behandlung erforderlich ist, verwenden Sie 1-2 Sprühstöße zweimal täglich über einen Zeitraum von 4-5 Tagen vor Ihrem Arztbesuch.
- Ziehen Sie das Außenohr oder die Ohrmuschel vorsichtig aufwärts und nach hinten (siehe Abbildung A).
- Halten Sie die Flasche aufrecht und platzieren Sie die Öffnung in den Gehörgang. Nun drücken Sie den Sprühkopf 1-2 mal vollständig nach unten.

- Massieren Sie vorsichtig den Tragus (siehe Abbildung A).
- Wiederholen Sie den kompletten Vorgang für das andere Ohr, falls notwendig.
- Spülen Sie das Ohr nach der Behandlung nicht aus.
- Vaxol® kann im Stehen oder aufrechten Sitzen angewendet werden.
- Der Sprühkopf kann abgenommen und nach Gebrauch unter heißem Wasser abgespült werden. Danach wieder aufsetzen.

Zusätzliche Informationen

- Patienten mit perforiertem Trommelfell oder Ohrenschmerzen sollten das Produkt nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Kinder unter 1 Jahr sollten Vaxol® nur nach vorheriger Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Olivenöl ist ein Naturprodukt und die Verwendung ist weit verbreitet. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt. Das Produkt bei einer bekannten Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Olivenöl nicht verwenden.
- Nebenwirkungen bei der Verwendung dieses Produkts während der Schwangerschaft oder Stillzeit sind nicht bekannt. Trotzdem sollten Sie immer Ihren Arzt vor Verwendung kontaktieren.
- Nebenwirkungen bei Überdosierung sind nicht bekannt.
- Sollten Sie eine allergische Reaktion vermuten, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Hinweise

- Die Flasche sollte nur von einer Person verwendet werden.
- Vaxol® immer aufrecht bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C lagern.
- Das Produkt kann nach Anbruch bis zu 6 Monaten verwendet werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nach lokalen Behördenvorgaben.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Vaxol® ist nur für den Gebrauch im Gehörgang vorgesehen. Nicht in die Nähe von Augen, Nase oder Mund sprühen.

Inhaltsstoff: Olivenöl in pharmazeutischer Qualität

Stand der Information: 04-2021

Vaxol® ist ein Medizinprodukt Klasse I entsprechend der Europäischen Richtlinie 93/42/CEE

Hersteller:
HL Healthcare Ltd
Pure Offices,
Plato Close,
Warwick CV34 6WE,
United Kingdom

Importiert und vertrieben von:
Silicol GmbH
Teltower Straße 10
D-33719 Bielefeld

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



CE 10ml

V128-9 LAB001532