

Gebrauchsanweisung

BLUpaⁿ® protect 5 g Tube

BLUpaⁿ® protect ist eine isotone Augensalbe mit 0,4 % Natriumhyaluronat. Dieses Medizinprodukt schützt und befeuchtet die Augenoberfläche durch einen Schutzfilm.

WAS IST BLUpaⁿ® protect?

BLUpaⁿ® protect Tube enthält 5 g sterile, isotone Augensalbe. Das Präparat beinhaltet Natriumhyaluronat, Natriumchlorid, Vaselineöl, Vaseline, Kaliumdihydrogenphosphat, Kaliumsorbat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wollwachsalkohol, Wasser und Hydroxymethylglycinat. Die zähflüssige Beschaffenheit von BLUpaⁿ® protect ermöglicht ein längeres Anhaften an der Augenoberfläche, wo sich die schützende und befeuchtende Wirkung auch nachts entfalten kann.

WANN IST BLUpaⁿ® protect ANZUWENDEN?

BLUpaⁿ® protect ist eine sterile, isotone Augensalbe, die zur Linderung der Symptome eines Trockenen Auges und bei einem unvollständigen Lidschluß (Lagophthalmus) angezeigt ist. Die Rezeptur der Salbe begünstigt den Verbleib an der Augenoberfläche und das Natriumhyaluronat bildet eine Schutzschicht auf der Hornhautoberfläche, die das Auge befeuchtet und schützt. Natriumhyaluronat besteht aus Zuckerketten, die sich auf der Hornhautoberfläche verteilen und eine Struktur bilden, die Wassermoleküle einfangen kann. Diese Eigenschaft befeuchtet und schützt die Augenoberfläche. BLUpaⁿ® protect verbessert die Befeuchtung und Gleitfähigkeit der Augenoberfläche bei Trockenheit, Brennen oder müden Augen, die zum Beispiel, durch langes Fernsehen, längere Zeit am Monitor oder durch Heizungs-/Klimaanlagenluft verursacht werden. BLUpaⁿ® protect schützt die Hornhautoberfläche, verlangsamt die Verdunstung des Tränenfilms bei Patienten, die unter nächtlichem Lagophthalmus leiden, und lindert typische Symptome wie Trockenheit, Brennen, Fremdkörpergefühl im Auge.

WIE IST BLUpaⁿ® protect ANZUWENDEN?

- Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie BLUpaⁿ® protect anwenden.
- Nach dem Öffnen von BLUpaⁿ® protect, verwenden Sie nicht den ersten Tropfen, denn dieser könnte zu wässrig sein, bevor die Salbe aus der Tube kommt.
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges nach unten, um eine kleine Tasche zu bilden.
- Halten Sie die Tube senkrecht über Ihr Auge.
- Drücken Sie die Tube sanft, um eine kleine Menge von BLUpaⁿ® protect in das Auge einzuführen. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Auge.
- Wenden Sie eine kleine Menge der Salbe am besten vor dem Schlafengehen an.
- Falls Sie eine weitere Gabe tagsüber benötigen, verwenden Sie eine kleine Menge der Salbe alle drei oder vier Stunden, oder wie vom Arzt/von der Ärztin verordnet.
- Stellen Sie sicher, dass die Tubenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Nach Gebrauch ordnungsgemäß mit der Verschlusskappe verschließen.

WARNHINWEISE

- Wenden Sie BLUpaⁿ® protect nicht an, wenn eine Überempfindlichkeit bekannt ist oder Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.
- Falls eine Augenirritation auftritt, beenden Sie die Anwendung von BLUpaⁿ® protect und fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat.

- Nach der Anwendung kann es sein, dass Sie ein Fremdkörpergefühl im Auge haben, was aber durch mehrmaliges Blinzeln behoben wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Innerhalb von 8 Wochen nach Anbruch verwenden.
- Fern von direkter Hitze, an einem kühlen, trockenen Ort mit einer Temperatur von 9 bis 25°C lagern.
- Nicht schlucken.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Teilen Sie BLUpaⁿ® protect mit niemanden.
- Vorübergehendes verschwommenes Sehen kann wegen der zähflüssigen Beschaffenheit und längerer Verweildauer von BLUpaⁿ® protect am Auge auftreten. Stellen Sie sicher, dass Sie wieder klar sehen, bevor Sie ein Kraftfahrzeug führen, Werkzeuge benutzen oder Maschinen bedienen.
- Entfernen Sie Kontaktlinsen, bevor Sie die Salbe anwenden, da sonst die Oberfläche der Kontaktlinsen beeinträchtigt werden könnte.
- Falls Sie auch andere Augentropfen oder -salben benutzen, lassen Sie etwa fünf-zehn Minuten zwischen jeder Anwendung verstreichen. Es wird empfohlen, BLUpaⁿ® protect als letztes anzuwenden.
- Falls Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, bevor Sie BLUpaⁿ® protect anwenden.
- Normalerweise ist das Produkt für eine kontinuierliche Anwendung über maximal dreißig aufeinander folgende Tage vorgesehen; bitten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat, falls sich Ihre Symptome nicht verbessern.
- Verwenden Sie BLUpaⁿ® protect nicht bei Augenläsionen.

LOT Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett und der Faltschachtel eingeprägt.

-  Steril durch Bestrahlung.
-  Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.
-  Lagerungstemperatur.
-  Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.

**Hersteller:**
NTC S.r.l.
Via Luigi Razza 3
20124 Milano
Italy

Vertrieb in Deutschland:
Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Germany


 0426

STAND DER INFORMATION: 09/2020

pharma **STULLN**