

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

# N1 NARBEN GEL

- ✓ Zur Anwendung bei Narben, die durch Akne, Verbrennungen, Verletzungen oder Hautinfektionen entstanden sind, sowie bei erhabenen Narben.

**Allgemeiner Hinweis:** Lies die Packungsbeilage vor der Verwendung des N1 Narben Gels aufmerksam durch, auch wenn du dieses Medizinprodukt bereits verwendet hast. Die Informationen können sich aufgrund neuer Forschungen und Erkenntnisse geändert haben, seit du deine letzte Packung geöffnet hast. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei erhältlich. Dennoch sollte das N1 Narben Gel sorgfältig verwendet werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Bewahre diese Packungsbeilage auf, falls du sie später nochmals lesen möchtest.

**Was ist das N1 Narben Gel?** Das N1 Narben Gel ist ein transparentes Siliziumgel, das Polysiloxane enthält. Das N1 Narben Gel wird verwendet, um die Sichtbarkeit von Narben zu vermindern und die Bildung von Narbengewebe zu reduzieren. Das Gel lässt sich leicht auf die Narbe auftragen, ist nicht klebrig und trocknet schnell.

**Wofür wird das N1 Narben Gel verwendet?** Das Gel reduziert die Bildung von Narben und vermindert hypertrophe und keloidale Narbenbildung, zum Beispiel bei Verbrennungen, Akne, Operationen, Verletzungen und Hautinfektionen. Auch erhabene Narben können mit dem Gel behandelt werden. Das Gel kann sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Narben angewendet werden. Bei der Anwendung des N1 Narben Gels werden die Narben flacher, weicher, elastischer und weniger sichtbar. Darüber hinaus lindert das N1 Narben Gel Hautrötungen, Verfärbungen und Verdickungen der Haut und Juckreiz. Das Gel reduziert auch die Schmerzen von Narben. Je früher die Narbe mit dem N1 Narben Gel behandelt wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer bleibenden Narbe.



**Fragen zum Produkt?**  
Scan mich für eine pharmazeutische Beratung.



**Wie lange sollte ich das N1 Narben Gel verwenden?** Das N1 Narben Gel kann sofort nach dem Schließen einer Wunde verwendet werden. Je jünger und neuer eine Narbe ist (nicht älter als 2 Jahre), desto leichter wird sie verblassen. Die Chance, dass sich die Narbe deutlich verkleinert, ist größer, wenn die Behandlung so früh wie möglich beginnt. Bestehende (ältere) Narben brauchen einen längeren Zeitraum, um zu verblassen. Die Anwendungsdauer hängt von der Narbe ab. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Gel bei neuen Narben mindestens 2 Monate und bei bestehenden Narben mindestens 3-6 Monate lang angewendet wird. Die Behandlung kann so lange fortgesetzt werden, bis keine Beschwerden mehr durch die Narbe auftreten. Verwende das N1 Narben Gel nicht länger als an 30 aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn die Narbe einen längeren Zeitraum braucht, um zu verblassen, setze die Behandlung nach einer Pause von 2 Tagen fort.

**Zusammensetzung:** Cyclopentasiloxan, Cyclohexasiloxan, Dimethicon.

**Anwendung in der Schwangerschaft und/oder Stillzeit:** Konsultiere vor der Anwendung dieses Produktes deinen Arzt.



### Warnhinweise:

- Das N1 Narben Gel darf nicht bei offenen Wunden angewandt werden;
- Das N1 Narben Gel darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen;
- Augenkontakt vermeiden;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren;
- Wende dich an deinen Arzt oder Apotheker, bevor du das N1 Narben Gel zusätzlich zu einer anderen Hautbehandlung anwendest.

**Mögliche Nebenwirkungen:** In seltenen Fällen kann das N1 Narben Gel Hautrötungen, Schmerzen oder Hautreizungen verursachen. Brich die Behandlung ab, wenn allergische Reaktionen auftreten.

### Das N1 Narben Gel kann verwendet werden bei:


- Langanhaltender Rötung einer Narbe nach der Wundheilung;
- Verdickung, Wachstum oder Beschwerden einer frischen Narbe;
- Beschwerden einer älteren Narbe.
- Neuen und bestehenden Narben;
- Verringerung der Bildung hypertropher und keloider Narben, nach (tiefen) Wunden;
- Geschlossenen (genähten) Wunden nach einer Operation, einer Infektion oder einer anderen Schädigung der Haut;
- Einer geschlossenen Verbrennung;
- Aknenarben, auch wenn sie sich tief in der Haut befinden.

**Was ist eine Narbe?** Eine Narbe bildet sich nach einer tiefen Schädigung der Haut. Ist nur die Epidermis beschädigt, z. B. bei einer Schürfwunde, bilden sich keine Narben. Bei tieferen Wunden jedoch, bei denen die tiefere Lederhaut beschädigt ist, bildet sich während des Wundheilungsprozesses eine Narbe. Dieses Narbengewebe besteht aus Kollagen. Narbengewebe ist weniger elastisch als unbeschädigte Haut.


**Wann kann ich mit der Anwendung des N1 Narben Gels beginnen?** Sobald die Wunde geschlossen und verheilt ist oder die Nähte entfernt wurden. Bei einer bestehenden Narbe kann sofort mit der Anwendung begonnen werden.

**Anwendungshinweise:** Zunächst sollte die zu behandelnde Stelle mit Wasser gereinigt werden. Dann kann das Gel auf die saubere, trockene Haut aufgetragen werden. Achte darauf, dass du das Gel in einer sehr dünnen Schicht aufträgst. Massiere das Gel 2-mal täglich mit kreisenden Bewegungen in die Narbe und die umliegende Haut ein. Lasse das Gel trocknen (4 bis 5 Minuten). Überschüssiges Gel kann mit einem Tuch oder Taschentuch entfernt werden. Wenn das Gel getrocknet ist, kannst du nach Belieben Kosmetika auftragen.

**Nettogesamtgewicht:** 19 Gramm

 **Aufbewahrung:** Bei Raumtemperatur (15-25°C) an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwenden.

**Medizinprodukt:** Das N1 Narben Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

 **Verfallsdatum:** Es wird nicht empfohlen, das N1 Narben Gel nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums zu verwenden.

Datum der letzten Bearbeitung dieser Gebrauchsanweisung:  
November 2020

 **Peters Krizman AG**  
Schweizergasse 20  
CH-8001 Zürich, CH

V2.2

