

Gebrauchsanweisung

BLUp[®] lipid plus UD

BESCHREIBUNG

BLUp[®] lipid plus UD Augentropfen sind speziell für die intensive symptomatische Behandlung sehr trockener und chronisch trockener, gereizter Augen geeignet. Sie pflegen, befeuchten die Augenoberfläche und lindern die Symptome des trockenen Auges (Sicca-Syndrom, wie z. B. gereizte, gerötete, juckende, tränende und/oder sehr empfindliche Augen bzw. Augenoberfläche) durch die Bildung eines viskoelastischen und klaren Schutzfilms auf der empfindlichen Hornhaut, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen. Dies wird erreicht durch die hohe Wasserbindungsfähigkeit des enthaltenen Natriumhyaluronats, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure, das auch von Natur aus u.a. im Glaskörper des Auges vorkommt.

Darüber hinaus enthalten **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen das Provitamin B5 (Dexpanthenol), das aufgrund der hohen Wasserbindungskapazität die Fähigkeit hat, das Auge zu befeuchten und zusätzlich zu pflegen. Dadurch werden die feuchthaltenden Eigenschaften des Natriumhyaluronats sinnvoll unterstützt.

Zusätzlich beinhalten **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen Vitamin A, Vitamin E, Phospholipide, Carbomer und Glycerin. Die Antioxidantien Vitamin A und Vitamin E verhindern die Bildung freier Radikale und fungieren so als Schutzkomplex für die Zellen der Augenoberfläche. Phospholipide, gewonnen aus natürlichem Sojaöl, unterstützen die Regeneration der natürlichen Lipidschicht der Tränenflüssigkeit. Carbomer und Glycerin führen zu einer höheren Viskosität der Augentropfen und sorgen damit für eine längere Verweildauer der Tropfen auf der Augenoberfläche.

Diese besondere Zusammensetzung der Augentropfen mit den oben genannten Inhaltsstoffen schützt und befeuchtet somit die Augenoberfläche und mildert dadurch die Symptome trockener und chronisch trockener Augen spürbar und langanhaltend.

BLUp[®] lipid plus UD Augentropfen helfen effektiv bei Beschwerden in Zusammenhang mit:


- einer mechanischen Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch
- strapazierten Augen, z. B. durch Arbeit am Computer, mit Mikroskopen sowie bei/nach langen Autofahrten
- einem Fremdkörpergefühl im Auge
- der Einnahme bestimmter Arzneimittel
- einer nachlassenden Tränenproduktion mit zunehmendem Alter
- Allergenen wie Pollen, Tierhaare, Staub etc.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Die Kontaktlinsen müssen bei der Anwendung der Augentropfen nicht entnommen werden.

ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist (1). Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3-5mal täglich 1-2 Tropfen in den Bindehautsack des Auges (2). Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann (3).

Wenn keine Besserung eintritt oder sich die Beschwerden verschlimmern sollten, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

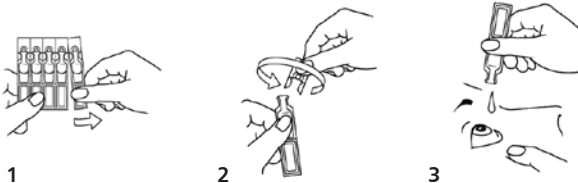

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat, Dexpanthenol, Phospholipide, Sojaöl, Vitamin E, Vitamin A, Ölsäure, Glycerin, Carbomer, Citronensäure, Wasser für Injektionszwecke.

PACKUNGSGRÖSSEN

Verkaufseinheiten:

Ein-Dosis-Behälter, 1 x 0,4 ml,
2 x 0,4 ml, 5 x 0,4 ml, 20 x 0,4 ml,
30 x 0,4 ml, 50 x 0,4 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behälter oder beschädigter Folienverpackung.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behälter nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- In sehr seltenen Fällen kann die Anwendung der Augentropfen bei sehr empfindlichen Augen bzw. Augenlidern zu Reizungen führen. Folgende Befindlichkeitsstörungen am Auge können eventuell auftreten: Rötung, Schmerzen, Brennen, Stechen, Juckreiz, Schwellung, Fremdkörpergefühl.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen keine Konservierungsmittel enthalten, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe kurzfristig verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Nach dem ersten Öffnen der Folienverpackung die Augentropfen nicht länger als 3 Monate anwenden.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behälter, auf der Folienverpackung sowie der Faltschachtel eingepreßt.
- **BLUp[®] lipid plus UD** Augentropfen befinden sich in kleinen Kunststoffbehältern, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Bitte bewahren Sie deshalb das Produkt unzugänglich für Kinder auf.
- Sollte bei Ihnen eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion während der

Anwendung oder in Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinproduktes auftreten, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behälter in der Folienverpackung vor Licht geschützt in der Originalfaltschachtel aufbewahren.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

- | | |
|---|---|
|  | Chargenbezeichnung |
|  | Verwendbar bis |
|  | Herstellungsdatum |
|  | Sterilisiert mit aseptischen Verfahren |
|  | Einfaches Sterilbarriere-System mit äußerer Schutzverpackung |
|  | Gebrauchsanweisung beachten |
|  | Temperaturgrenzwerte und Lagerungstemperatur |
|  | Vor Sonnenlicht schützen. Ein-Dosis-Behälter vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren. |
|  | Zum einmaligen Gebrauch. |
|  | Nach dem erstmaligen Öffnen der Folienverpackung die Augentropfen nicht länger als 3 Monate anwenden. |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung (Ein-Dosis-Behälter/Folienverpackung) beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten. |
|  | Medizinprodukt |
|  | Eindeutige Produkt-Identifizierung |
|  | Hersteller |
|  | Vertriebspartner |
|  | CE-Kennzeichnung=Symbol der Freiverkehrsfähigkeit in der EU mit Angabe der eingebundenen Benannten Stelle |
|  | Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln
Deutschland |
|  | Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln
Deutschland |

 0483

STAND DER INFORMATION: 03/2024