

Bentrio®

Gebrauchsanweisung

Was ist Bentrio®?

Bentrio® ist eine Gel-Emulsion, die als Nasenspray zum Selbstschutz angewendet wird. Es soll Ihnen helfen beim Schutz vor Allergenen, wie zum Beispiel Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaaren. Bentrio® ist frei von arzneilichen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Antihistaminika oder Steroiden, und enthält keine Konservierungsstoffe.

Wie wirkt Bentrio®?

Die Nasenhöhlen sind mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Diese Schleimhaut dient als erste Abwehrlinie des Körpers gegen eingeatmete Partikel, wie zum Beispiel Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare. Sie sondert Schleim ab, der die Partikel zur Reinigung einfängt und über den Rachen entfernt. Ihre Schutzfunktion kann durch Trockenheit oder Reizung der Nase (z. B. aufgrund von niedriger Luftfeuchtigkeit, Verwendung abschwellender Nasensprays) oder Schleimhautschäden beeinträchtigt werden. Außerdem kann sie mit der Menge von eingeatmeten Partikeln überfordert sein.

Bentrio® schützt die Nasenschleimhaut auf dreifache Weise:



Bildung einer dünnen Schutzschicht auf der Nasenschleimhaut



Bindung eingeatmeter Partikel durch elektrostatische Wirkung



Befeuchtung der Schleimhaut und somit Unterstützung ihrer Funktionsfähigkeit

Die Gel-Formulierung von Bentrio® wurde für eine ausgedehnte Verweildauer in der Nase entwickelt. Beim Schütteln der Sprühflasche wird das Gel flüssig, so dass es in die Nase gesprüht werden kann. Nach dem Kontakt mit der Nasenschleimhaut wird die Formulierung wieder gelartig und bildet die Schutzbarriere. Bentrio® wird mit der Zeit aus den Nasenhöhlen in den Rachenraum befördert und über den Verdauungstrakt ausgeschieden.

Indikationen für den Gebrauch

Bentrio® hilft allergische Symptome, die durch luftgetragene Allergene verursacht werden, wie z. B. Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare, zu verhindern oder zu lindern.

Inhaltsstoffe

Gereinigtes Wasser, gemischte Decanoyl- und Octanoylglyceride (MIGLYOL® 812 N), Propylenglykol, Bentonit, Glycerolmono- und -dipalmitostearat (GELEOL® Mono- und Diglyceride), Xanthan, Dinatrium-EDTA, Mannitol, Zitronensäure, Butylhydroxyanisol, Vanillin.

Wer kann Bentrio® verwenden?

Bentrio® ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter der Aufsicht von Erwachsenen oder anderen Betreuungspersonen geeignet.

Gegenanzeigen

Verwenden Sie Bentrio® nicht, wenn Sie jemals eine allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe hatten oder wenn Sie eine Wunde oder ein Geschwür in der Nase haben.

Lagerung von Bentrio®

Zwischen 8 °C und 27 °C lagern. Nicht einfrieren. Innerhalb von 6 Monate nach der ersten Anwendung und vor dem auf der Sprühflasche angegebenen Verfallsdatum verwenden.

Anwendung von Bentrio®

Wenden Sie 1-2 Sprühstöße pro Nasenloch 3-mal pro Tag oder nach Bedarf an (nicht mehr als 8 Sprühstöße pro Nasenloch und Tag). An nicht mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen anwenden. Klinische Daten zeigen, dass Bentrio® während mindestens 3 Stunden Schutz vor Pollen bietet.

Wenden Sie Bentrio® vor einer möglichen Belastung durch luftgetragene Allergene an.



Schnäuzen Sie Ihre Nase sanft. Schütteln Sie die Flasche fünfmal kräftig auf und ab.



Nehmen Sie die Schutzkappe ab. Pumpen Sie vor dem ersten Gebrauch durch wiederholtes Betätigen vor (sprayen Sie dabei in die Luft oder in ein Tuch), bis ein voller Sprühstoß erscheint.



Beugen Sie den Kopf leicht nach vorne, führen Sie den Sprühkopf so weit als möglich in die Nase ein und halten Sie die Flasche aufrecht, während Sie die Spraypumpe 1- oder 2-mal kräftig betätigen.



Wiederholen Sie die Anwendung in dem anderen Nasenloch. Wischen Sie den Sprühkopf ab und setzen Sie die Kappe wieder auf.

Nach der Anwendung von Bentrio® spüren Sie möglicherweise vorübergehend ein leichtes Gefühl einer verstopften Nase. Später spüren Sie vielleicht vorübergehend etwas Gel im Rachen, wenn Bentrio® aus den Nasenhöhlen wegbefördert wird. Wenn Sie sich die Nase schnäuzen oder niesen, sollten Sie Bentrio® erneut anwenden. Sollten Sie zusätzlich ein medizinisches Nasenspray verwenden, verwenden Sie es vor Bentrio®.

Informationen zum sicheren Gebrauch

Wischen Sie den Sprühkopf nach jedem Gebrauch gründlich mit einem sauberen, trockenen und unbenutzten Tuch ab und setzen Sie die Schutzkappe auf. Teilen Sie Bentrio® nicht mit anderen Anwendern, um eine mögliche Verunreinigung zu vermeiden. Verwenden Sie das Nasenspray nicht, wenn der Sicherheitsverschluss geöffnet ist oder fehlt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen

Bentrio® hat keine pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen Auswirkungen. Alle Inhaltsstoffe verfügen über ein gut etabliertes Sicherheitsprofil und werden seit vielen Jahren in anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln verwendet. Klinische Tests bestätigten, dass Bentrio® gut verträglich ist. Im Falle von Nebenwirkungen sollten Sie die Behandlung sofort abbrechen. Bei anhaltenden Symptomen sollten Sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Zuletzt überarbeitet: 2022-07.
CE Kennzeichnung: 2021.



Laboratoires CHEMINEAU
93 Route de Monnaie
37210 VOUVRAY, FRANCE



www.bentrio.com



20 mL



8 °C



120
Sprühstöße

altamira
medica



Instructions d'utilisation

Qu'est-ce que Bentrio® ?

Bentrio® est un spray nasal contenant un gel sous forme d'émulsion ayant une fonction auto protectrice. Il a été conçu pour vous aider dans la protection contre les allergènes tels que le pollen, les acariens ou les squames d'animaux. Bentrio® ne contient aucun médicament tel que des antihistaminiques ou des stéroïdes et ne contient aucun conservateur.

Comment agit Bentrio® ?

Les cavités nasales sont recouvertes d'une muqueuse qui sert de première ligne de défense du corps face aux particules inhalées telles que le pollen, les acariens ou les squames d'animaux. La muqueuse nasale agit comme une barrière protectrice contre ces particules; elle sécrète un mucus capturant les particules qui sont ainsi éliminées par la gorge. Sa fonction protectrice peut être compromise par une irritation ou une sécheresse nasale (p. ex. en raison de la sécheresse de l'air ou de l'effet de certains sprays nasaux), ou par des lésions de la muqueuse. De même, cette fonction protectrice peut être compromise par la quantité de particules inhalées.

Bentrio® protège la muqueuse nasale de trois façons:



Forme une fine couche protectrice sur la muqueuse nasale.



Piège les particules inhalées par effet électrostatique.



Humidifie la muqueuse et contribue ainsi à sa fonctionnalité.

La formulation en gel de Bentrio® a été conçue pour rester plus longtemps dans le nez. En secouant le flacon, le gel devient liquide ce qui permet sa pulvérisation dans le nez. Après être entrée en contact avec la muqueuse nasale, la formulation retourne à l'état de gel et crée donc une barrière protectrice. Avec le temps, Bentrio® est évacué de la cavité nasale vers la gorge et éliminé par le système digestif.

Indications d'utilisation

Bentrio® aide à prévenir l'apparition et diminuer les symptômes allergiques engendrés par des allergènes aériens tels que le pollen, les acariens ou les squames d'animaux

Ingredients

Eau purifiée, glycérides, décanoyle et octanoyle mélangés (MIGLYOL® 812 N), propylène glycol, bentonite, mono- et dipalmitostéarate de glycérol (GELEOL® Mono et Di-glycérides), gomme xanthane, EDTA disodique, mannitol, acide citrique, butylhydroxyanisole, arôme vanille.

Qui peut prendre Bentrio®?

Bentrio® convient aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans sous la supervision de leurs parents ou d'autres personnes qui en ont la garde.

Contre-indications

N'utilisez pas Bentrio® si vous avez déjà eu une réaction allergique à l'un des ingrédients ou si vous avez une blessure ou un ulcère dans le nez.


Comment conserver Bentrio®

A conserver entre 8 °C et 27 °C. Ne pas congeler. A utiliser dans les 6 mois suivant l'ouverture ou avant la date d'expiration indiquée sur le flacon.

Comment utiliser Bentrio®

Appliquer 1 ou 2 pulvérisations par narine 3 fois par jour ou selon les besoins (pas plus de 8 pulvérisations par narine et par jour) sur une période maximale de 30 jours consécutifs. Bentrio® fournit une protection cliniquement prouvée contre le pollen pendant au moins 3 heures.

Appliquer Bentrio® avant une exposition potentielle aux allergènes aériens.

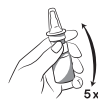

Mouchez-vous doucement. Secouez le flacon vigoureusement cinq fois de haut en bas.



Enlevez le capuchon protecteur. Amorcez la pompe avant la première utilisation en l'actionnant de manière répétée (dirigez-la dans l'air ou vers un mouchoir) jusqu'à ce qu'elle produise une pulvérisation complète.



Penchez légèrement la tête vers l'avant, introduisez la pointe du spray au maximum et tenez le flacon droit en l'actionnant vigoureusement 1 ou 2 fois.



Répétez l'application dans l'autre narine. Essuyez la pointe du spray et remettez le capuchon.

Après l'application de Bentrio®, vous pouvez éventuellement ressentir une sensation légère et passagère d'avoir le nez bouché. Par la suite, vous pourriez éventuellement ressentir le passage de la formulation dans votre gorge au moment où Bentrio® sera évacué des cavités nasales. Si vous vous mouchez ou si vous éternuez, appliquez Bentrio® une nouvelle fois. Si vous utilisez un spray nasal médical, appliquez-le avant Bentrio®.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

Après chaque utilisation, essuyez soigneusement la pointe du spray avec une lingette propre, sèche et non utilisée, et remplacez le capuchon protecteur. Ne partagez pas Bentrio® avec d'autres utilisateurs afin d'éviter une contamination éventuelle. Ne pas utiliser si le sceau d'invulnérabilité est endommagé ou s'il n'est pas présent.

Sécurité et effets secondaires éventuels

Bentrio® ne présente aucun effet pharmacologique, immunologique ou métabolique. Tous les ingrédients ont un profil de sécurité bien établi et ont été utilisés pendant de nombreuses années dans d'autres dispositifs médicaux ou médicaments. Les essais cliniques confirment que Bentrio® est bien toléré.

En cas d'effets indésirables, vous devez interrompre le traitement immédiatement ; si les symptômes persistent, envisagez un traitement médical.

Dernière mise à jour : 2022-07.

Marquage CE : 2021.



Laboratoires CHEMINEAU
93 Route de Monnaie
37210 VOUVRAY, FRANCE



www.bentrio.com



20 mL



8 °C



27 °C



120

Pulvérisations

altamira
medica