

GEBRAUCHSANLEITUNG für Artikel LK-008 (LEIKANG Partikelmaske FFP2 NR)

WICHTIG :

In der PSA-Verordnung (EG) Nr. 2016/425, EN 149:2001+A1:2009 unterscheidet man 3 Kategorien von filtrierenden Halbmasken gegen feste und flüssige Aerosole: FFP1, FFP2 und FFP3.

ANWENDUNG:

Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zu einem 10 fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

Verwenden Sie diese Maske NICHT zum Schutz gegen Dämpfe/Gase in Konzentrationen von mehr als dem 1-fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

PRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH:

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, NUTZEN SIE DIE MASKE AUF KEINEN FALL. Benutzen Sie eine neue.

AUFSETZANLEITUNG:



- D** 1. Öffnen Sie die Maske.
2. Setzen Sie die offene Seite der Maske unter dem Kinn an und ziehen Sie mit beiden Händen an den elastischen Bändern, sodass der Nasenrücken an Ihrem Gesicht anliegt.
3. Befestigen Sie die Bänder hinter Ihren Ohren und stellen Sie sie so ein, dass sie bequem sind.
4. Drücken Sie mit beiden Händen den Nasenrücken an, bis die Maske abdichtet. Überprüfen Sie den Sitz der Maske.
5. Mit beiden Händen an den Ohrbänder abnehmen und dabei nicht die infizierte Vorderseite der Maske berühren.

Um die Gesichtsabdichtung zu prüfen, halten Sie die Maske in beiden Händen und atmen Sie tief ein. In der Maske sollte ein Unterdruck spürbar sein. Bei Luftaustritt am Nasenbügel muss dieser stärker angedrückt werden. Bei anderen undichten Stellen den Sitz der Maske leicht verändern und der Gesichtsform anpassen.

ANMERKUNG: Maske sofort austauschen, wenn das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, dass eine optimale Atmung nicht möglich ist.

Ein Atemschutz ist nur dann gewährleistet, wenn das entsprechende Gerät richtig ausgewählt, angepasst und während der Zeit, in welcher der Träger Gefahren ausgesetzt ist, getragen wird.

WARNHINWEISE:

1. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essentiell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieser Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.
2. Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 17% Sauerstoff enthält.
3. Atemschutzmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellen.
4. Nicht für die Benutzung in einer explosiven Atmosphäre geeignet. 5. Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atmen schwierig wird, (b) Schwindel oder Erschöpfung auftritt.
6. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsform können u. U. die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren. 7. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden. 8. Mit der Aufschrift „NR“ gekennzeichnete Masken: Verwendung nur für die Dauer einer Arbeitsschicht. Eine Wartung ist nicht erforderlich. Entsorgen Sie die gebrauchte Maske nach einer Arbeitsschicht.

Diese filtrierende Halbmaske ist nur für den Einmalgebrauch geeignet (bei einer maximalen Tragedauer von 8 Stunden) und sollte nicht wiederverwendet werden.

LAGERUNG:

Nachfolgende Hinweise sind nur gültig bei Lagerung in geschlossener Originalverpackung (1 Stück im Beutel).

Der Temperaturbereich der Lagerung sollte idealerweise bei 20-23°C liegen. Der Maximale Feuchtigkeitsgrad in der Raumluft sollte stets bei unter 90% liegen. Bei optimaler Lagerung ist der Artikel 2 Jahre haltbar.

Hergestellt/Importiert von : Siehe Kontaktdetails auf der Verpackung.



Notifizierte Stelle:

Universal Certification & Surveillance Service Trade Ltd. Co., Kosuyolu Ali Nazim Street 43, Kadikoy-Istanbul, Turkey

Hersteller:

Wenzhou LeiKang Medical Technology Co., LTD., Address: Room 401, 4th Floor, Building 21, No. 89 Fengfang Road, Ou Hai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Postcode:325000, Tel:+86-577-56771120, Web:http://www.wzleikang.com/en